



Assembly Instructions / Montageanleitung / Instructions pour le montage / Инструкция по сборке


1

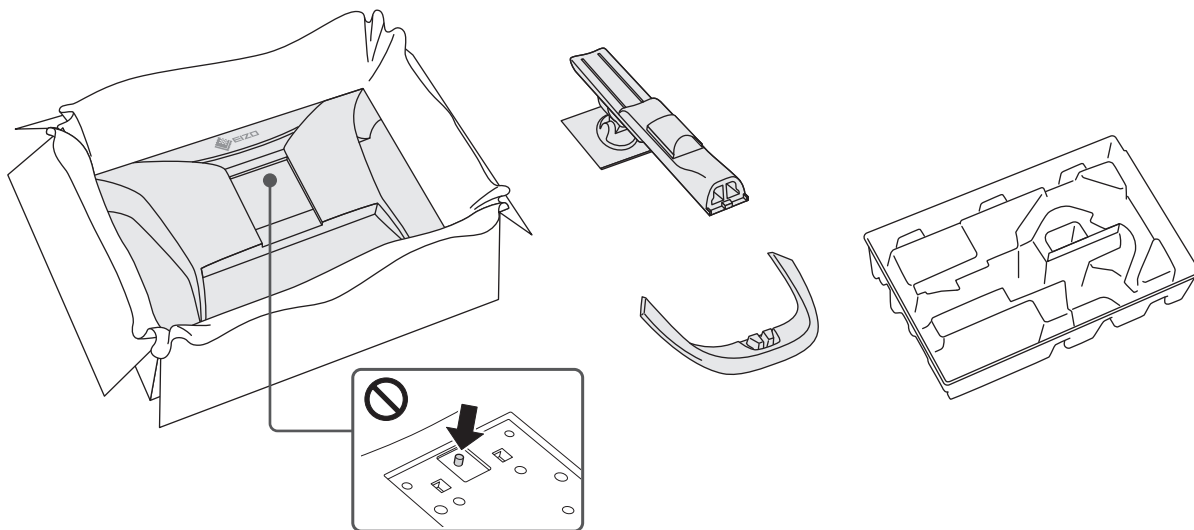


2

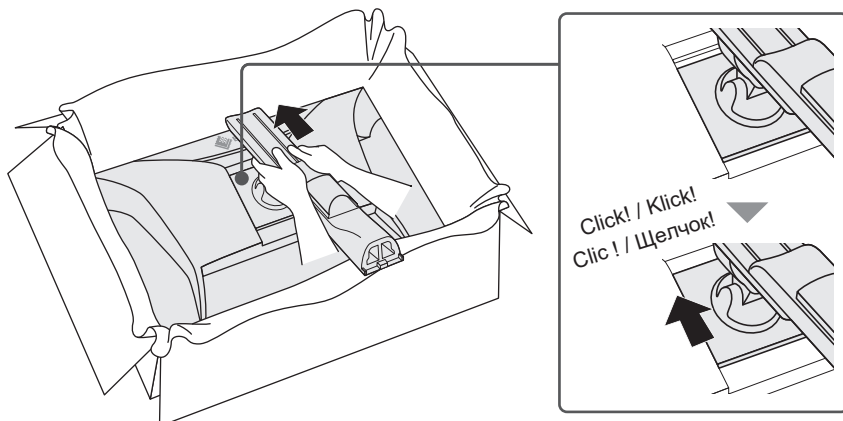

3

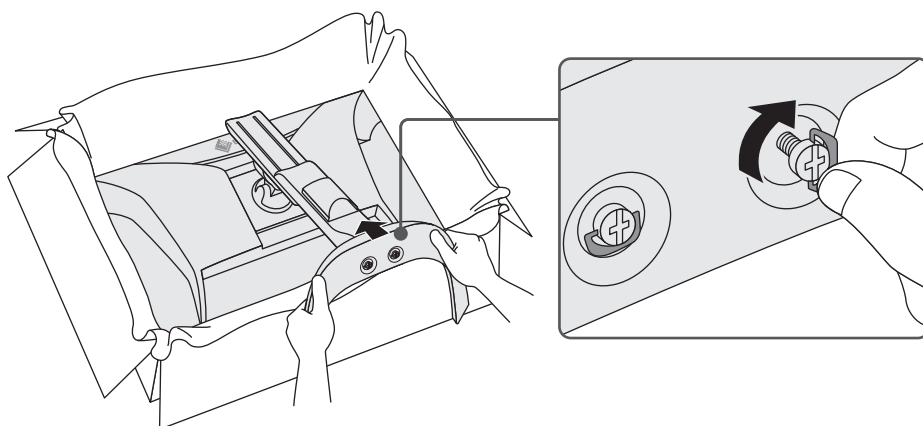

4

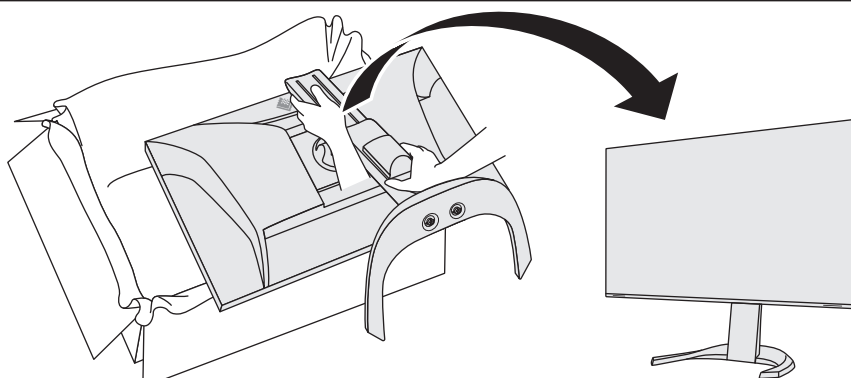



CAUTION / VORSICHT / ATTENTION / ВНИМАНИЕ

When taking out the monitor from the package box, hold the top and bottom of the stand. When doing so, be careful not to press down hard on the screen with your hands.

Fassen Sie den Monitor beim Herausnehmen aus der Verpackung oben und unten am Standfuß an. Drücken Sie dabei mit Ihren Händen nicht fest auf die Oberfläche des Bildschirms.

Lorsque vous sortez le moniteur de son emballage, tenez le haut et le bas du pied. Ce faisant, veillez à ne pas appuyer fortement sur l'écran avec vos mains.


Вынимая монитор из упаковочной коробки, держитесь за верхнюю и нижнюю части стойки. При этом старайтесь не нажимать на экран руками с усилием.

When rotating the monitor, be careful to not let its edges collide with the table.

Achten Sie beim Drehen des Monitors darauf, dass die Kanten nicht gegen den Tisch stoßen.

Lorsque vous faites pivoter le moniteur, assurez-vous que ses bords ne heurtent pas la table.

Вращайте монитор с осторожностью, чтобы не задеть стол его краями.

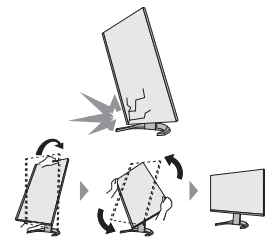


When moving or transporting the monitor, place your fingers in the handle (recess on the back surface) and lift the monitor.

Wenn Sie den Monitor bewegen oder transportieren, legen Sie Ihre Finger in den Griff (die Vertiefung auf der Rückseite des Monitors) und heben Sie den Monitor an.

Lors du déplacement ou du transport du moniteur, placez les doigts dans la poignée (renforcement au dos de la surface) et soulevez le moniteur.

При перемещении или транспортировке монитора поместите пальцы в ручку (углубление на задней поверхности) и поднимите монитор.

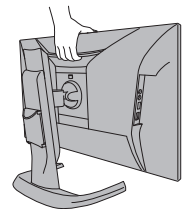

Be careful not to hold the screen with your hands.

Achten Sie darauf, den Bildschirm nicht mit Ihren Händen festzuhalten.

Veillez à ne pas tenir l'écran avec les mains.

Следите за тем, чтобы не брать за экран руками.



Cleaning and disinfecting the product may lead to deterioration or damage of the product, so please check the precautions on our website.

How to check: Access www.eizoglobal.com and type "disinfect" in the search box on the site to search.

Die Reinigung und Desinfektion des Produkts kann zu einer Verschlechterung oder Beschädigung des Produkts führen. Prüfen Sie daher bitte die Sicherheitshinweise auf unserer Webseite.

Vorgehensweise zur Prüfung: Rufen Sie www.eizoglobal.com auf und geben Sie „disinfect“ in das Suchfenster der Seite ein, um eine Suche durchzuführen.

Le nettoyage et la désinfection peuvent entraîner une détérioration ou un endommagement du produit.

Veillez vous reporter aux précautions d'emploi sur notre site Web.

Comment vérifier : rendez-vous sur www.eizoglobal.com et saisissez « disinfect » dans le champ de recherche du site.

Очистка и дезинфекция продукта могут вызвать его повреждение. Поэтому ознакомьтесь с мерами предосторожности, указанными на нашем веб-сайте.

Как ознакомиться: зайдите на веб-сайт www.eizoglobal.com и введите в поле поиска слово «disinfect».