



Инструкции за употреба

RadiForce® RX670

Цветен LCD монитор

Важно

Преди да използвате продукта, непременно прочетете инструкциите за употреба и ръководството за инсталиране.

- За настройки и регулиране на монитора вижте ръководството за инсталиране.
- Най-новата продуктова информация, включително инструкции за употреба, е публикувана на уебсайта ни.

www.eizoglobal.com

СИМВОЛИ

В това ръководство и този продукт са използвани символите по-долу. Те обозначават критичната информация. Моля, прочетете ги внимателно.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Несъобразяването с информацията, указана чрез ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, може да доведе до сериозни наранявания и да бъде животозастрашаващо.
 ВНИМАНИЕ	Несъобразяването с информацията, указана чрез ВНИМАНИЕ, може да доведе до средни наранявания и/или до повреждане на имущество или на продукта.
	Указва предупреждение или необходимост от повишено внимание. Например  указва опасност от „токов удар“.
	Указва забранено действие. Например  означава „Не разглобявайте“.

Този продукт е настроен специално за работа в района, където първоначално е доставен.

Ако работи извън този район, може да не работи според указаното в спецификациите.

Никаква част от това ръководство не може да се възпроизвежда, съхранява в електронни системи или предава под никаква форма и по никакъв начин, електронен, механичен или друг, без предварителното писмено разрешение на EIZO Corporation. EIZO Corporation не е задължена да запазва поверителността на каквито и да било предоставени материали или информация, освен ако не са сключени предварителни споразумения с EIZO Corporation за съответната информация. Въпреки че са направени всички усилия да се гарантира, че това ръководство осигурява актуална информация, моля, имайте предвид, че спецификациите на продукта на EIZO подлежат на промяна без предизвестие.


ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Важно

Този продукт е настроен специално за работа в района, където първоначално е доставен. Ако работи извън този район, може да не работи според указаното в спецификациите.

За лична безопасност и правилна поддръжка, моля, прочетете внимателно раздела ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ и предупрежденията за внимание върху монитора.

Местоположение на предупрежденията за внимание

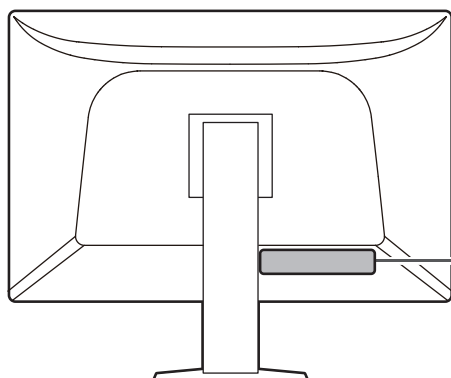



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.


WARNUNG
GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.

警告
触电危険、请勿打开后盖。

警告
感電の恐れあり、カバーをあけないでください。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
L'appareil doit être relié à une prise avec terre.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
设备必须连接到接地的电源插座。
電源コードのアースは必ず接地してください。

Символи върху устройството

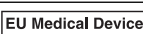Символ	Този символ указва
	Главен прекъсвач: Натиснете, за да изключите захранването на монитора.
	Главен прекъсвач: Натиснете, за да включите захранването на монитора.
	Бутон за включване: Натиснете, за да включите или изключите монитора.
	Променлив ток
	Предупреждение за опасност от токов удар
	ВНИМАНИЕ
	WEEE маркиране: Продуктът трябва да се изхвърля разделно; материалите могат да се рециклират.
	Маркировка CE: Маркировка за съответствие ЕС съгласно указанията на съответните Директива и/или Регламент на Съвета (ЕС).
	Производител
	Дата на производство
	Внимание: Федерален закон (САЩ) ограничава продажбата на това устройство само от или при поръчка от лицензиран лекар.
	Медицинско устройство в ЕС

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Символ	Този символ указва
EU Importer	Вносител в ЕС
	Означение за съответствие с регламентите на Обединеното кралство
UK Responsible Person	Отговорно лице в Обединеното кралство
	Упълномощен представител в Швейцария
	Упълномощен представител в Европейския съюз

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Ако от уреда започне да излиза пушек, да мирише на изгоряло или да се чуват странни шумове, изключете всички захранващи връзки незабавно и се свържете с вашия представител на EIZO за съвет. Опитите да ползвате неизправно устройство могат да доведат до пожар, токов удар или повреда на оборудването.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Не разглобявайте и не модифицирайте устройството. Отварянето на корпуса може да доведе до токов удар или изгаряне чрез високо напрежение или нагорещени части. Модификацията на устройството може да причини пожар или токов удар. 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	За всякакво обслужване се обръщайте към квалифицирани сервизни техници. Не опитвайте да обслужвате този продукт сами, тъй като отварянето или отстраняването на капаците може да причини пожар, токов удар или повреда на оборудването.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Дръжте странични предмети и течности далече от устройството. Случайното попадане на метални части, запалими материали или течности във вътрешността на корпуса може да причини пожар, токов удар или повреда на оборудването. Ако предмет или течност попадне в корпуса, незабавно изключете устройството от контакта. Устройството трябва да бъде проверено от квалифициран сервизен техник, преди да го използвате отново. 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Поставете устройството на надеждно и стабилно място. Ако устройството е поставено върху неподходяща повърхност, то може да падне и да причини нараняване. Ако устройството падне, го изключете незабавно от захранването и попитайте местния представител на EIZO за съвет. Не използвайте повредено устройство. Това може да причини пожар или токов удар.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте устройството на подходящо място.

Неспазването на това условие може да причини пожар, токов удар или повреда на оборудването.

- Не поставяйте устройството на открито.
- Не го поставяйте в каквито и да било средства за транспортиране (кораби, самолети, влакове, автомобили и т.н.).
- Не го поставяйте в прашна или влажна среда.
- Не го поставяйте на места, където може да попадне вода върху екрана (бани, кухни и т.н.).
- Не го поставяйте на места, където пара отива директно към екрана.
- Не го поставяйте в близост до устройства, генериращи топлина или влага.
- Не го поставяйте на места, където продуктът ще бъде изложен на пряка слънчева светлина.
- Не поставяйте в среда със запалим газ.
- Не поставяйте на места, където има наличие на корозивни газове (например серен диоксид, водороден сулфид, азотен диоксид, хлор, амоняк и озон).
- Не поставяйте на места, където има наличие на прах или компоненти, усилващи корозията в атмосферата (например натриев хлорид и сяра), проводими метали и т.н.



 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дръжте найлоновите опаковки далеч от бебета и деца.

Те може да причинят задушаване.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте приложения захранващ кабел и го свържете към стандартния контакт за вашата страна.

Не забравяйте, че трябва да се спазва номиналното напрежение на захранващия кабел. В противен случай може да се причини пожар или токов удар.

Захранване: 100 – 240 V (променлив ток), 50/60 Hz


 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да изключите захранващия кабел, хванете щепсела здраво и дръпнете.

При издърпване кабелът може да се повреди и това може да доведе до пожар или токов удар.



ОК

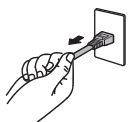

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Оборудването трябва да бъде свързано към заземен контакт.

Ако не спазите това изискване, това може да предизвика пожар или токов удар.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Използвайте правилното напрежение.**

- Устройството е предназначено за употреба само под определено напрежение. Свързването към напрежение, различно от посоченото в инструкциите за употреба, може да причини пожар, токов удар или повреда на оборудването.
Захранване: 100 – 240 V (променлив ток), 50/60 Hz
- Не претоварвайте електрическата мрежа, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Използвайте внимателно захранващия кабел.**

Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Не дърпайте и не усуквайте кабела. Използването на повреден захранващ кабел може да причини пожар или токов удар.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Операторът не трябва да докосва пациента, докато се докосва до продукта.**

Този продукт не е предназначен за докосване от пациенти.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Никога не пипайте щепсела и захранващия кабел, ако те започнат да пращат.**

Докосването им може да причини токов удар.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****При закрепване на чупещата се стойка направете справка с ръководството на потребителя и монтирайте устройството безопасно.**

В противен случай то може да се откачи и да причини нараняване и/или до повреда на оборудването.

Преди инсталиране се уверете, че всички маси, стени и други монтажни повърхности имат достатъчна механична сила.

Ако устройството падне, го изключете незабавно от захранването и попитайте местния представител на EIZO за съвет. Не използвайте повредено устройство. Това може да причини пожар или токов удар. Когато поставите отново наклонената стойка, моля, използвайте същите винтове и ги затегнете здраво.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Не докосвайте повреден LCD панел директно с голи ръце.**

Ако част от кожата ви или тялото ви влезе в непосредствен контакт с панела, изплакнете обилно.

Ако течни кристали попаднат в устата или в очите ви, незабавно изплакнете с голямо количество вода и потърсете медицинска помощ. В противен случай е възможно да получите токсична реакция.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За монтаж на високи места потърсете помощ от професионалист.

Когато монтирате монитора на високо, има опасност той или негови части да паднат и да причинят нараняване. Потърсете помощ от строителен специалист, когато монтирате монитора. Освен това проверете продукта за повреда или деформации преди и след монтирането му.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Не гледайте директно към източника на задното осветление или помощната лампа.
Това може да причини дискомфорт на очите или зрителни проблеми.

ВНИМАНИЕ

Не прилагайте груба сила върху рамото на помощната лампа.
Силното огъване или усукване на рамото може да го повреди или развали.

ВНИМАНИЕ

Преди употреба проверете работното състояние.
Започвайте употребата само след като сте се уверили, че няма проблеми с показваното изображение.
При използване на няколко устройства, започвайте употребата само след като сте се уверили, че изображенията се показват правилно.

ВНИМАНИЕ

Закрепвайте здраво кабелите, които са предназначени да бъдат закрепвани.
Ако те не са закрепени здраво, може да се разкачат и вследствие на това изображенията да бъдат прекъснати, а работата ви – нарушена.

ВНИМАНИЕ



Разкачете кабелите и премахнете аксесоарите, когато премествате устройството.
В противен случай те може да се откачат при преместването и да причинят нараняване.

ВНИМАНИЕ

Носете или поставяйте устройството в съответствие с точно определените методи.

- Когато местите продукта, дръжте здраво долната част на монитора.
- Мониторите с размер 30 и повече инчове са тежки. Разопаковането и/или пренасянето на монитора трябва да се извършва най-малко от двама души.
- Ако моделът на вашето устройство има ръкохватка на задната част на монитора, хванете и здраво дръжте долната част и ръкохватката на монитора.

Изпускането на устройството може да причини нараняване или да доведе до повреда на оборудването.

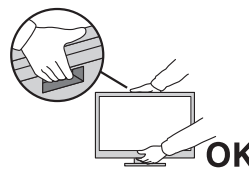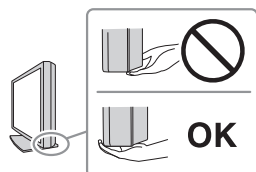

ВНИМАНИЕ

Внимавайте, за да не прещипете ръцете си.
Ако натиснете монитора силно, за да регулирате височината или ъгъла му, е възможно да прещипете и нараните ръцете си.

 ВНИМАНИЕ Не блокирайте вентилационните отвори по корпуса. • Не поставяйте никакви предмети върху вентилационните отвори. • Не инсталирайте устройството в място с недобра вентилация или недостатъчно пространство. • Не използвайте уреда легнал или наобратно. Блокирането на вентилационните отвори предотвратява правилното движение на въздуха и може да доведе до пожар, токов удар или повреда на оборудването. 
 ВНИМАНИЕ Не пипайте щепсела на захранващия кабел с мокри ръце. Докосването му може да причини токов удар.  
 ВНИМАНИЕ Не поставяйте предмети около щепсела на захранващия кабел. Това ще улесни изключването му от захранването в случай на проблем. 
 ВНИМАНИЕ Периодично почиствайте областта около щепсела и вентилационния отвор на монитора. Наличието на прах, вода или мазнина в тази област може да предизвика пожар.
 ВНИМАНИЕ Изключете устройството от контакта, преди да го почистете. Почистването на устройството, докато е включено в захранването, може да доведе до токов удар.
 ВНИМАНИЕ Ако възнамерявате да не използвате устройството за дълъг период, извадете щепсела от контакта, след като изключите прекъсвача на захранването за безопасност и пестене на енергия.
 ВНИМАНИЕ Изхвърляйте този продукт съгласно законите в района или страната на местопребиваване.
 ВНИМАНИЕ За потребители на територията на ЕИП и Швейцария: Всеки сериозен инцидент, който е възникнал във връзка с устройството, трябва да бъде докладван на производителя и компетентния орган в държавата членка, в която се намира потребителят и/или пациентът.

Бележка за този монитор

Показания за употреба

Този продукт е предназначен за показване на радиологични изображения за преглед, анализ и диагностика от обучени здравни специалисти. Дисплеят не е предназначен за мамография.

Внимание

- Този продукт не е предназначен за употреба при инвитро диагностика.
- Този продукт може да не е под гаранция за цели, различни от описаните в това ръководство.
- Спецификациите в това ръководство са приложими само при използване на захранващите кабели, предоставени заедно с продукта, и посочените от EIZO сигнални кабели.
- Използвайте с този продукт само оригинални аксесоари, посочени от EIZO.

Предпазни мерки при работа

- След използване за продължителен период от време е възможно влошаване на характеристиките на някои компоненти (например LCD панела и вентилатора). Периодично проверявайте дали работят нормално.
- Когато изображението на екрана се смени, след като дълго време се е показвало едно и също изображение, може да се появи сянка. Използвайте скрийнсейвъра или функцията за пестене на енергия, за да избегнете показването на едно и също изображение за продължително време. В зависимост от показваното изображение сянка може да се появи и след кратък период от време. За да премахнете подобен нежелан ефект, променете изображението или изключете захранването за няколко часа.
- Необходими са няколко минути, докато работата на дисплея на монитора се стабилизира. Моля, изчакайте няколко минути или повече, след като захранването на монитора е включено или мониторът се е възстановил от енергоспестяващ режим, преди да го използвате.
- Ако екранът на монитора работи продължителен период от време, може да се появят размазвания или прогаряния. За да увеличите максимално продължителността на живот на монитора, препоръчваме периодично да го изключвате.
- Подсветката на LCD панела има фиксиран живот. В зависимост от начина на употреба, например при продължителни периоди без изключване, експлоатационният живот на подсветката може да бъде скъсен и да се наложи замяна. Когато екранът започне да потъмнява или да трепти, моля, свържете се с местния представител на EIZO.
- Екранът може да има дефектни пиксели или малък брой светли точки. Това се дължи на характеристики на самия LCD панел и не е свързано с неизправност на продукта.
- Не натискайте силно повърхността или външната рамка на LCD панела, тъй като това може да доведе до неизправност на дисплея, като например смущения и т.н. Прилагането на постоянен натиск върху повърхността на LCD панела може да влоши състоянието на течните кристали или да повреди панела. (Ако останат следи от натиск върху LCD панела, оставете монитора с черен или бял екран. Симптомът може да изчезне.)

- Не драскайте и не натискайте LCD панела с остри предмети, тъй като това може да причини повреда. Не се опитвайте да го бършете с тъкани, тъй като това може да повреди панела.
- Не докосвайте вградения сензор за калибриране (интегриран преден сензор). Това може да намали точността на измерванията или да доведе до повреда на оборудването.
- В зависимост от околната среда, измерваната от вградения сензор за осветеност стойност може да се различава от стойността, показвана от друг прибор за измерване на осветеност.
- Възможно е да се появи конденз по повърхността или във вътрешността на този продукт, когато бъде преместен в студено помещение, при внезапно повишаване на температурата или когато бъде преместен от студено в топло помещение. В този случай не включвайте устройството. Вместо това изчакайте кондензацията да изчезне, тъй като в противен случай може да причини повреда на устройството.

За използване на монитора продължително време

Контрол на качеството

- Качеството на изображението на мониторите се влияе от нивото на качество на входните сигнали и влошаването на характеристиките на изделието. Извършвайте визуални проверки и периодични тестове на стабилността (включително проверка на сивата скала) на работните характеристики, за да се спазват медицинските стандарти и указания за вашето приложение, и при необходимост извършвайте калибриране. Софтуерът RadiCS (опция) ви дава възможност да осъществявате контрол на качеството на монитора в съответствие с медицинските стандарти/указания.
- Моля, изчакайте 15 минути или повече, след като захранването на монитора е включено или мониторът се е възстановил от енергоспестяващ режим, преди да извършите тестове за контрол на качеството, калибриране или коригиране на екрана на монитора.
- Препоръчваме мониторите да са настроени на препоръчителното или на по-ниско ниво на яркост, за да се намалят промените в яркостта на екрана, причинени от продължителна употреба, както и да се съхрани стабилността на яркостта.
- За коригиране на резултатите от измерванията на вградения сензор за калибриране (интегриран преден сензор) с тези от външен сензор, който се продава отделно, извършете корелация между интегрирания преден сензор и външния сензор с помощта на RadiCS (незадължителен аксесоар)/RadiCS LE (включен в пакета). Периодично извършваната корелация ви дава възможност да поддържате измерванията с интегрирания преден сензор на ниво, еквивалентно на това на външния сензор. За подробности относно корелацията вижте ръководството за потребителя на RadiCS/RadiCS LE.

Внимание

- Състоянието на екрана на монитора може да се промени неочаквано поради грешка по време на работа или непредвидена промяна на настройките. Препоръчително е след коригиране на екрана да използвате монитора със заключени бутони за управление. За подробности относно настройването вижте ръководството за инсталиране (на CD-ROM).

Почистване

- Периодичното почистване е препоръчително, за да се запазят физическите качества на продукта и да се удължи животът му.

- Петната по продукта могат да бъдат отстранени с внимателно забърсване с мека кърпа, напоена с вода, или с помощта на ScreenCleaner.

Внимание

- Не позволявайте течности да влизат в пряк контакт с продукта. Ако това се случи, забършете незабавно.
- Не позволявайте течности да попаднат в отворите или във вътрешността на продукта.
- Когато използвате химикали за почистване или дезинфекция, алкохолът и антисептичните разтвори например може да причинят гланциране, потъмняване и избледняване на продукта, както и да влошат качеството на показваните изображения. Не използвайте химически вещества често.
- Никога не използвайте разреждател, бензен, восък или абразивни препарати, тъй като е възможно да повредят продукта.
- За повече информация относно почистването и дезинфекцията вижте уебсайта ни. Как да проверите: Отворете www.eizoglobal.com и въведете „disinfect“ в полето за търсене в сайта.

Дезинфекция с химикали

- При дезинфекцията на продукти препоръчваме да използвате химикали, които са тествани от нас (вижте таблицата по-долу). Обърнете внимание, че използването на тези химикали не гарантира, че продуктът няма да се повреди или влоши.

Категория	Тип химикал	Примерен продукт
На база алкохол	Етилов алкохол	Етанол
На база алкохол	Изопропанол	Изопропилов спирт
Хлор	Натриев хипохлорит	Purelox
Бигуанид	Хлорхексидин глюконат	Hibitane разтвор
На база алкохол	Бензалкониев хлорид	Welpas
На база алдехид	Глутарал	SteriHyde
На база алдехид	Глутарал	Cidex Plus28
Амфотерно повърхностноактивно вещество	Алкилдиаминоетилглицин хидрохлорид	Разтвор от сатенидин

За да използвате монитора удобно

- Прекалено тъмен или ярък екран може да повлияе на вашите очи. Настройте яркостта на монитора според условията на обкръжаващата среда.
- Взирането в монитора продължително време изморя очите. Почивайте по 10 минути на всеки час.
- Гледайте към екрана от достатъчно голямо разстояние и под правилен ъгъл.

Предупреждения и отговорности във връзка с киберсигурността

- Актуализациите на фърмуера трябва да се извършват чрез EIZO Corporation или оторизиран дистрибутор.
- Ако EIZO Corporation или дистрибуторът дадат указания за актуализиране на фърмуера, изпълнете ги незабавно.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ	3
Важно	3
Местоположение на предупрежденията за внимание	3
Символи върху устройството	3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	5
ВНИМАНИЕ	9
Бележка за този монитор	11
Показания за употреба	11
Предпазни мерки при работа	11
За използване на монитора продължително време	12
Контрол на качеството	12
Почистване	12
Дезинфекция с химикали	13
За да използвате монитора удобно	13
Предупреждения и отговорности във връзка с киберсигурността	13
1 Въведение	16
1.1 Характеристики	16
1.1.1 Свободно оформление	16
1.1.2 Лесно опроводяване	16
1.1.3 Поддържа извеждане на видео сигнал и захранване с помощта на единична кабелна връзка през USB Type-C	16
1.1.4 Хибриден монохромен и цветен дисплей	17
1.1.5 Контрол на качеството	17
1.1.6 Функция за докинг станция	17
1.1.7 С функция за осветление (RadiLight)	17
1.1.8 Конструкцията води до икономия на място	18
1.1.9 Работа с монитора от мишката и клавиатура	18
1.2 Съдържание на пакета	19
1.2.1 EIZO LCD Utility Disk	19
1.2.2 RadiCS LE	20
1.2.3 Използване на RadiCS LE	20
1.3 Контрол и функции	21
1.3.1 Отпред	21
1.3.2 Назад	22
2 Инсталиране/свързване	24
2.1 Преди инсталиране	24
2.1.1 Условия за инсталиране	24
2.2 Свързване на кабелите	25

2.3	Свързване на RadiLight Focus (помощна лампа).....	30
2.4	Включване на захранването.....	30
2.5	Коригиране на височината на екрана и ъгъла	31
2.6	Поставяне на капака за конекторите	32
2.7	Използване на RadiLight Area/RadiLight Focus.....	33
3	Няма картина	34
4	Спецификации	36
4.1	Списък на спецификациите	36
4.1.1	Тип.....	36
4.1.2	LCD панел.....	36
4.1.3	Видео сигнали	36
4.1.4	USB.....	36
4.1.5	Мрежа.....	37
4.1.6	Захранване	37
4.1.7	Физически спецификации.....	37
4.1.8	Изисквания за работната среда.....	37
4.1.9	Условия за транспортиране/съхранение	37
4.2	Поддържани разделителни способности	38
4.3	Аксесоари.....	38
	Приложение	39
	Медицински стандарт	39
	Класификация на оборудването	39
	Информация за EMC.....	40
	Среда за използване по предназначение	40
	Техническо описание	41

1 Въведение

Благодарим Ви, че избрахте цветния LCD монитор на EIZO.

1.1 Характеристики

1.1.1 Свободно оформление

- Този продукт предлага функции PbyP (Картина до картина) и PinP (Картина в картина), които могат да изобразяват до три сигнала едновременно.




- Мониторът предоставя функцията One Cable PbyP, която показва изображения в режим PbyP с помощта на един сигнален кабел.

1.1.2 Лесно опроводяване

Мониторът има изходен конектор USB Type-C® (USB-C®).


Този конектор дава възможност за извеждане на сигнал към друг монитор.

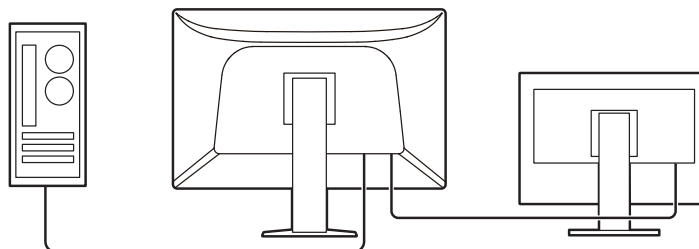

1.1.3 Поддържа извеждане на видео сигнал и захранване с помощта на единична кабелна връзка през USB Type-C

Този продукт е оборудван с USB-C конектор и поддържа предаване на видео сигнали (алтернативен режим за DisplayPort™), както и захранване (USB Power Delivery).

Той осигурява максимална мощност от 94 W към свързания ноутбук компютър, когато се използва като външен монитор.

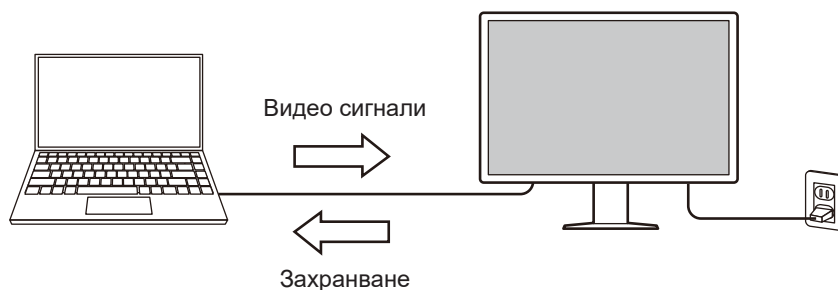

Бележка

- За да бъдат изведени видео сигнали, свързаното устройство трябва да поддържа предаване на видео (алтернативен режим за DisplayPort).
- За използване на функцията за зареждане свързаното устройство трябва да поддържа зареждане чрез USB Power Delivery.
- Максималната мощност от 94 W може да бъде осигурена само когато се използват следните USB кабели:
 - CC150SS81G-5A (в комплекта).
- Свързаните устройства могат да се зареждат дори когато мониторът е в енергоспестяващ режим.

1.1.4 Хибриден монохромен и цветен дисплей


Когато функцията Hybrid Gamma PXL е активирана, този продукт автоматично различава монохромните и цветните части на ниво пиксел в едно и също изображение и съответно ги показва с оптимални градиенти.

1.1.5 Контрол на качеството

- Мониторът има вграден сензор за калибриране (интегриран преден сензор). Този сензор позволява на монитора да извършва независимо калибриране (SelfCalibration) и проверка на сивата гама.
- Включеният в комплекта софтуер RadiCS LE ви дава възможност да калибрирате монитора и да управлявате историята.
- Софтуерът RadiCS за контрол на качеството на монитора ви дава възможност да осъществявате контрол на качеството на монитора в съответствие с медицинските стандарти/указания.

1.1.6 Функция за докинг станция

Мониторът е оборудван с LAN порт и USB концентратор и може да се използва като докинг станция. С помощта на USB-C кабел можете да изградите стабилна мрежова среда дори на нутбук компютри или таблети, които нямат LAN портове. Можете също да използвате съвместими с USB периферни устройства и да зареждате смартфони (вижте „Използване на функцията за докинг станция“ в ръководството за инсталиране).

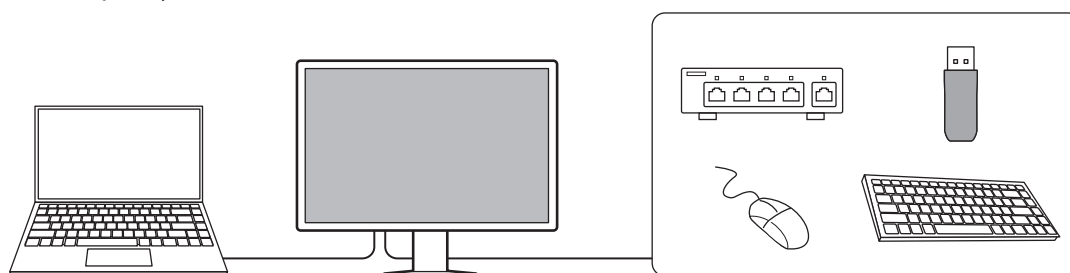
**1.1.7 С функция за осветление (RadiLight)**

RadiLight Area (задно осветление)

- RadiLight Area е функция за задно осветление, вградена в монитора. Тя осветява помещението с помощта на непряк източник на светлина в задната част на монитора, което дава възможност за ефективно интерпретиране на радиологични изображения на слабо осветени места.


RadiLight Focus (помощна лампа)

- RadiLight Focus е помощна лампа, която може да се демонтира. Тя може да освети работното ви място, когато четете, пишете документи или използвате клавиатура.

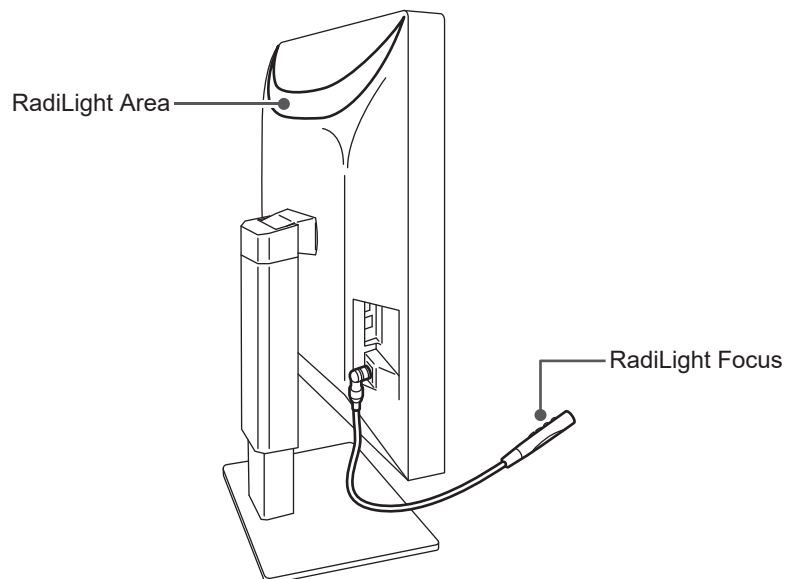

1.1.8 Конструкцията води до икономия на място

Мониторът е оборудван с няколко USB конектора (за свързване към компютър). Можете да работите с няколко компютъра, като използвате един комплект USB устройства (мишка, клавиатура и др.).

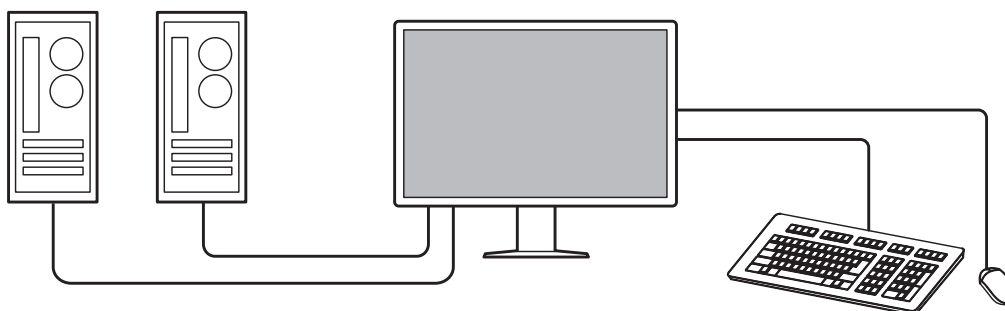

1.1.9 Работа с монитора от мишката и клавиатура

С помощта на софтуера за контрол на качеството RadiCS/RadiCS LE можете да извършвате следните дейности с монитора като използвате мишката и клавиатура:

- Превключване на режими CAL Switch
- Превключване на входни сигнали.
- Функция, която присвоява който и да било режим на CAL Switch (Ключ за калибриране) на част от екрана и показва изображение (Point-and-Focus)
- Показване или скриване на под-прозореца PinP (Hide-and-Seek)
- Превключване на компютри, които използват USB устройства (Switch-and-Go)
- Влизане в режим на пестене на енергия (Backlight Saver)
- Функция, която временно увеличава яркостта, за да подобри видимостта на образите за диагностика (Instant Backlight Booster)

Бележка

- Софтуерът RadiCS/RadiCS LE ви дава възможност да показвате или скривате подпрозореца за PinP и същевременно да превключвате компютъра, използван за работа с USB устройства. За повече информация относно процедурата за настройване направете справка с потребителското ръководство на RadiCS/RadiCS LE.

1.2 Съдържание на пакета

Уверете се, че всеки от следните елементи е наличен в опаковъчната кутия. В случай на липса или повреда на който и да било от тях се свържете с вашия доставчик или с местния представител на EIZO.

Бележка

- Препоръчва се да запазите опаковъчната кутия и материалите за опаковане, така че да е възможно използването им при преместване или транспортиране на този продукт.

- Монитор
- Захранващ кабел



- Кабел за цифров сигнал (DisplayPort – DisplayPort): PP300-V14 x 2



- Кабел за цифров сигнал (HDMI – HDMI): HH300PR x 1



- Кабел USB 2.0 (USB-A – USB-B): UU300 x 2



- Кабел USB-C (USB-C – USB-C): CC150SS81G-5A x 1



- Капак за конекторите (ляв)
- Капак за конекторите (десен)
- RadiLight Focus (помощна лампа)
- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Инструкции за употреба

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk

Дискът (CD-ROM) съдържа следното. Вижте Readme.txt на диска за процедурите по стартиране на софтуера или за справка относно файловете.

- Файл Readme.txt
- Софтуер за контрол на качеството на монитора RadiCS LE (за Windows)
- Потребителско ръководство
 - Инструкции за употреба за този монитор
 - Ръководство за инсталиране на монитора
 - Потребителско ръководство за RadiCS LE
- Габаритни размери

1.2.2 RadiCS LE

RadiCS LE ви предоставя възможност да извършвате следните операции за контрол на качеството и управление на монитора. За повече информация относно софтуера или процедурите за конфигуриране направете справка с ръководството за потребителя на RadiCS LE.

Контрол на качеството

- Извършване на калибриране
- Показване на резултатите от теста в списък и създаване на отчет за теста
- Задаване на цел за самостоятелно калибриране и график за изпълнение

Работа с монитора

- Превключване на режими CAL Switch
- Превключване на входни сигнали.
- Функция, която присвоява който и да било режим на CAL Switch (Ключ за калибриране) на част от екрана и показва изображение (Point-and-Focus)
- Показване или скриване на под-прозореца PinP (Hide-and-Seek)
- Превключване на компютри, които използват USB устройства (Switch-and-Go)
- Влизане в режим на пестене на енергия (Backlight Saver)
- Функция, която временно увеличава яркостта, за да подобри видимостта на образите за диагностика (Instant Backlight Booster)
- Функция, която автоматично коригира яркостта на монитора спрямо нивото на околната светлина при работа в текстов режим (Auto Brightness Control)

Внимание
• Спецификации на RadiCS LE подлежат на промяна без предизвестие. Най-новата версия на RadiCS LE е налична за сваляне от нашия сайт: (www.eizoglobal.com)


1.2.3 Използване на RadiCS LE

За информация относно инсталирането и използването на RadiCS LE направете справка с потребителското ръководство за RadiCS LE (на CD-ROM).

Когато използвате RadiCS LE, свържете монитора към вашия компютър с помощта на предоставения USB кабел. За допълнителна информация относно свързването на монитора вижте [2.2 Свързване на кабелите](#) ► 25].


1.3 Контрол и функции

1.3.1 Отпред

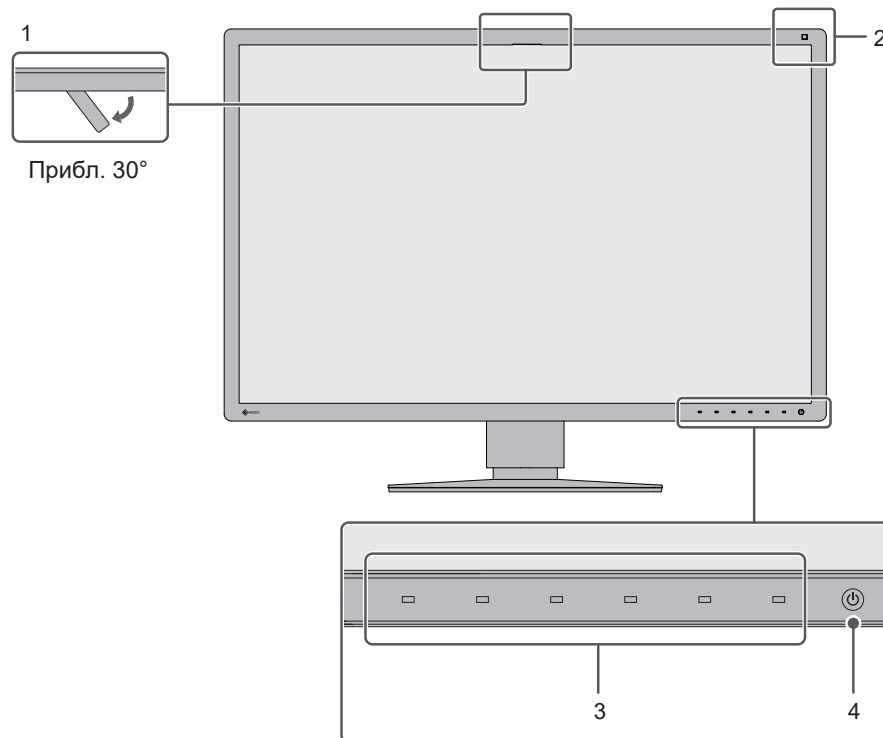

1. Интегриран преден сензор (подвижен)	Този сензор служи за калибриране и за проверка на нивата на сивото.
2. Сензор за осветеността	Този сензор измерва околната осветеност. Измерването на околната осветеност се извършва с помощта на софтуера за контрол на качеството RadiCS/RadiCS LE.
3. Функционални прекъсвачи	Показва инструкциите за работа. Задаване на менютата в съответствие с инструкциите за работа.
4. Прекъсвач	Включва или изключва захранването. При включване на захранването индикаторът на прекъсвача светва. Цветът на индикатора е различен в зависимост от работното състояние на монитора. Зелено: нормален работен режим; Оранжево: режим за пестене на енергия, изключено: захранването е включено или изключено

1.3.2 Назад

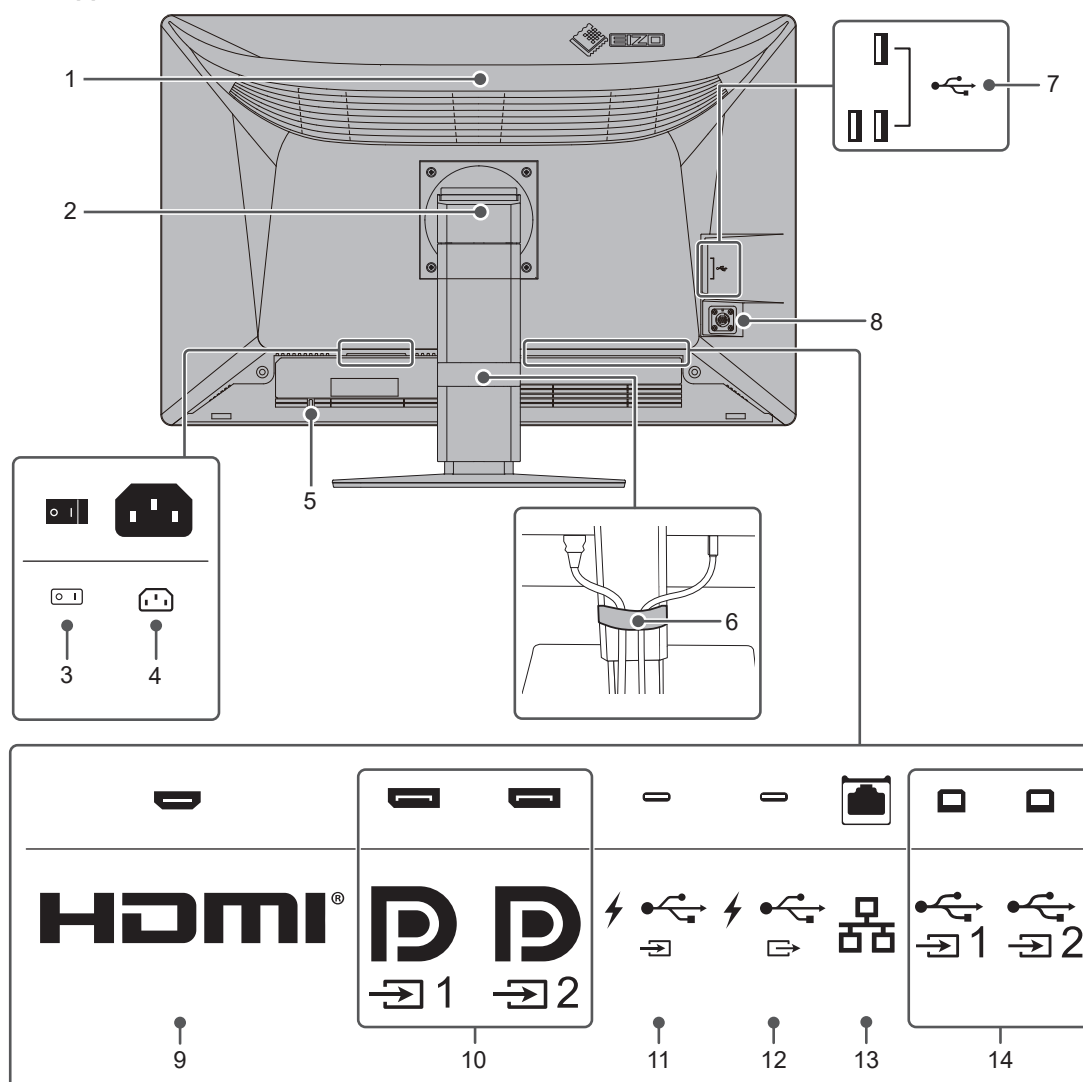

1. RadiLight Area (задно осветление)	Функция за задно осветление, вградена в монитора. Осветява помещението чрез непряк източник на светлина в задната част на монитора.
2. Стойка	Коригира височината и ъгъла (накланяне и завъртане) на монитора.
3. Главен прекъсвач	Включва или изключва главното захранване. ○ : изключено, : включено
4. Захранващ конектор	Свързва захранващия кабел.
5. Слот за заключване за защита	Отговаря на системата за сигурност на Kensington MicroSaver.
6. Кабелен държач	Дава възможност за прибиране на кабелите.
7. USB-A конектор (за свързване на периферни устройства)	Служи за свързване на периферно USB устройство (вижте „Използване на функцията за докинг станция“ в ръководството за инсталиране).
8. Конектор за помощна светлина	Служи за свързване на RadiLight Focus.
9. Конектор за HDMI	Служи за свързване към компютър с HDMI изход.
10. Конектор за DisplayPort	Служи за свързване към компютър с DisplayPort изход.

11. USB-C конектор (за връзка към компютър)	Служи за свързване към компютър с USB-C изход. Също така предава USB сигнала, който е необходим за използването на софтуер, изискващ USB връзка, или на функцията за докинг станция (вижте „Използване на функцията за докинг станция“).
12. USB-C конектор (за свързване на периферни устройства)	За последователно свързване включете кабела в съответния USB конектор на друг монитор. Освен това можете да свържете периферно USB устройство (вижте „Използване на функцията за докинг станция“ в ръководството за инсталиране).
13. LAN порт	Служи за свързване към мрежов концентратор или рутер с помощта на LAN кабел, за да се използва мрежовата връзка на докинг станцията (вижте „Използване на функцията за докинг станция“ в ръководството за инсталиране).
14. USB-B конектор (за връзка към компютър)	Служи за свързване към компютър, когато използвате софтуер, изискващ USB връзка на компютър без USB-C порт, или функцията за USB концентратор на този продукт.

2 Инсталиране/свързване

2.1 Преди инсталиране

Внимателно прочетете [ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ \[► 3\]](#) и винаги спазвайте инструкциите.

Ако поставите продукта върху маса с лаково покритие, съществува риск цветното покритие да полепне отдолу на стойката поради структурата на каучука. Преди употреба огледайте повърхността на масата.

2.1.1 Условия за инсталиране

Ако инсталирате монитора в шкаф, се уверете, че от двете му страни, отзад и отпред на монитора оставяте достатъчно пространство.

Внимание
• Поставете монитора така, че да не се допускат светлинни смущения по екрана.

2.2 Свързване на кабелите


Внимание

- Преди свързване проверете дали мониторът, компютърът и периферните устройства са изключени.
- Когато заменят текущия монитор с този, преди да осъществите връзка с компютъра, вижте [4.2 Поддържани разделителни способности \[► 38\]](#), за да промените настройките за разделителната способност и честотата на вертикално сканиране на компютъра на такива, които се поддържат от този монитор.
- В случай на затруднение при поставяне на кабелите коригирайте ъгъла на екрана.

1. Свържете сигналните кабели.

Проверете формите на конекторите и свържете кабелите.


В режим за показване на единичен прозорец

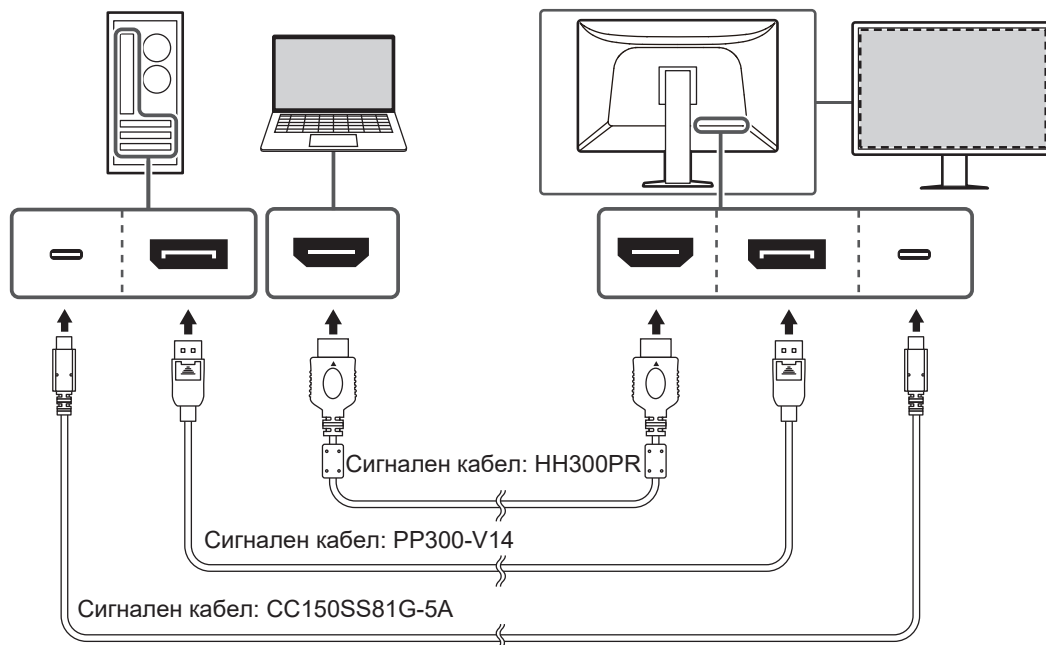

Внимание


- По подразбиране се показва сигналът от конектора DisplayPort 1. Ако искате да се изведе сигналът от друг конектор, превключете входния сигнал (вижте „Превключване на входни сигнали“ в ръководството за инсталиране).
- Ако използвате USB-C не само за показване на видео, но и за контрол на качеството на монитора чрез RadiCS/RadiCS LE и за свързване на USB устройства (съвместими с USB периферни устройства), трябва да зададете „USB Selection“ на „USB-C“ в менюто за настройки. За подробности вижте ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
- Възможно е HDMI® сигналите да се извеждат в ограничен диапазон.

Показване в режим PbyP (DisplayPort 1/DisplayPort 2)

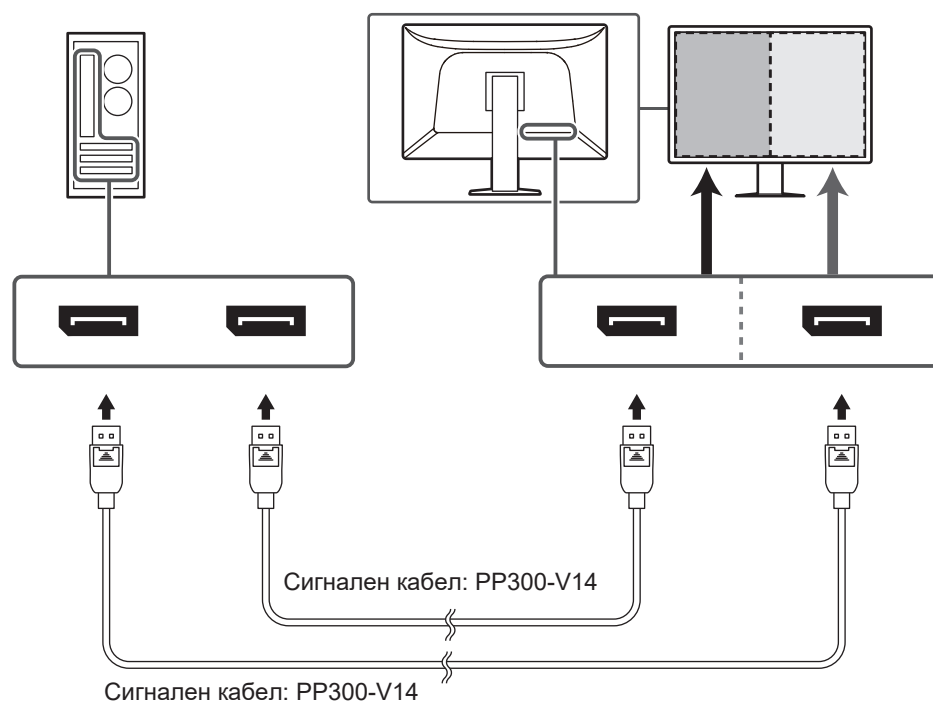

Внимание


- За извеждане на сигнал в режим PbyP (DisplayPort 1/DisplayPort 2) трябва да конфигурирате „PbyP Settings“ в менюто за настройки. За подробности вижте ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
- Когато използвате PbyP за показване на изображения от два компютъра, някои аспекти за контрол на качеството, като например калибрирането, може да са ограничени.

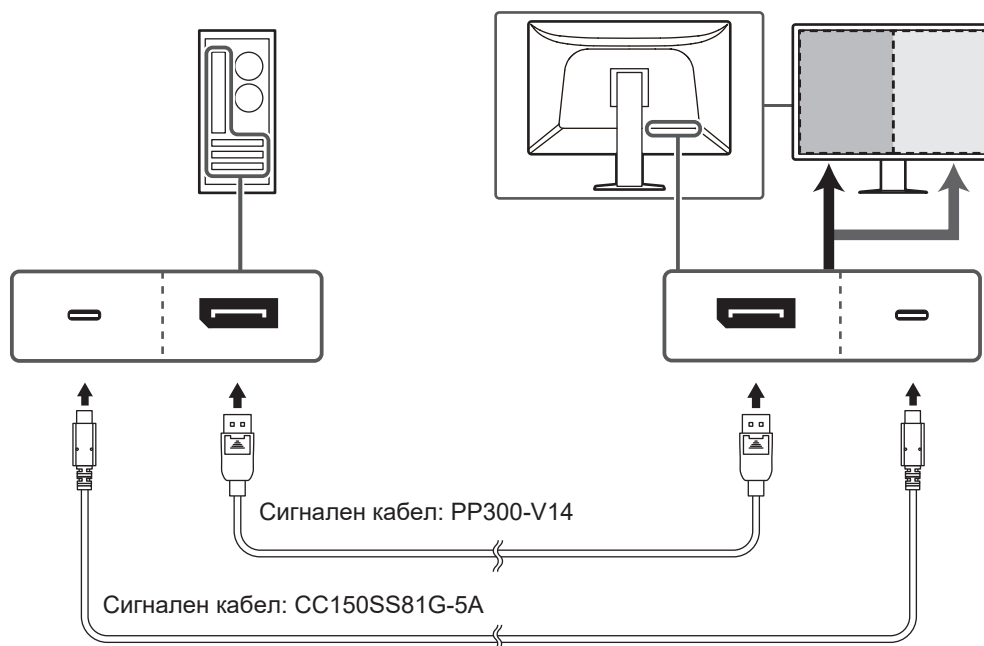Показване в режим PbyP (PbyP с един кабел)**Внимание**

- За извеждане на сигнал в режим PbyP (One Cable PbyP) използвайте връзка през конектора DisplayPort 1 или USB-C (за връзка към компютър: ). Също така трябва да конфигурирате настройката „PbyP Settings“ в менюто за настройки. За подробности вижте ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
- Ако използвате USB-C не само за показване на видео, но и за контрол на качеството на монитора чрез RadiCS/RadiCS LE и за свързване на USB устройства (съвместими с USB периферни устройства), трябва да зададете „USB Selection“ на „USB-C“ в менюто за настройки. За подробности вижте ръководството за инсталиране (на CD-ROM).

Показване в режим PinP (подпрозорец)

Например: Използване на HDMI конектора

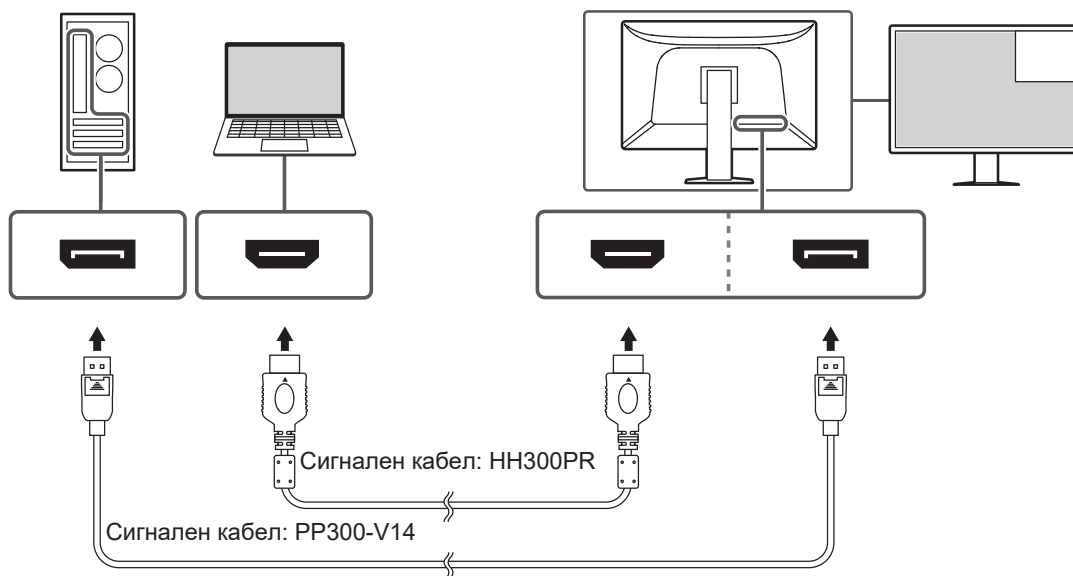


Внимание

- За извеждане на сигнал в режим PinP (подпрозорец), трябва да конфигурирате настройката „PinP Settings“ в менюто за настройки. За подробности вижте ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
- Функцията за показване в режим PinP (подпрозорец) не може да се използва при извеждане на HDMI сигнал на един екран.

При последователно свързване на други монитори


Входният сигнал към конектора DisplayPort 1 или USB-C (за връзка към компютър: ) ще бъде изведен на друг монитор.

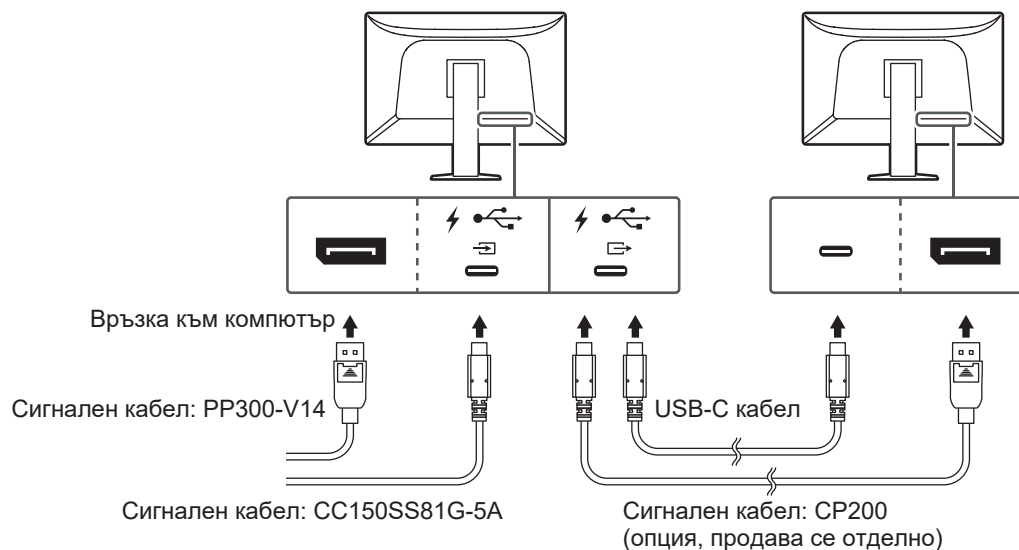

Внимание

- Посетете уебсайта на EIZO относно информация за мониторите и графичните платки, които могат да се използват за последователно свързване: (www.eizoglobal.com)
- За да настроите последователно свързване, използвайте конектора DisplayPort 1 или USB-C (за връзка към компютър: ). Също така трябва да конфигурирате настройката „Daisy Chain“ в менюто за администраторски настройки. За подробности вижте ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
- По подразбиране USB-C портът (за свързване на периферни устройства: ) е затворен с капаче. Свалете капачето, когато го използвате.

2. Включете захранващия кабел в контакта и захранващия конектор в монитора. Вкарайте захранващия кабел докрай в монитора.
3. Ако не използвате USB-C връзка и ползвате RadiCS/RadiCS LE или свързвате USB устройства (съвместими с USB периферни устройства) към монитора, включете USB 2.0 кабел в USB-B конектора на монитора и в USB-A конектора на компютъра.

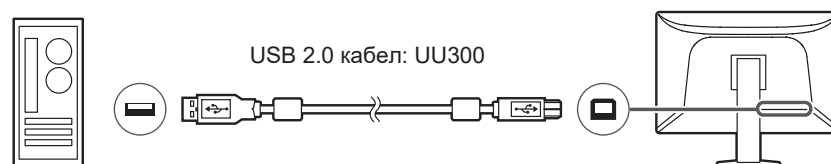


Внимание

- Когато свързвате монитора към компютър, където е инсталиран RadiCS/RadiCS LE, свържете USB-B 1 () или USB-C (за връзка към компютър: )
- Преди да използвате USB-B 2 () , свалете капачето. Освен това променете настройката за „USB Selection“ в менюто за настройки (вижте „Избиране на опция за USB“ в ръководството за инсталиране).

2.3 Свързване на RadiLight Focus (помощна лампа)

Свържете помощната лампа RadiLight Focus към предназначения за нея конектор на компютъра.

Накрайникът може да бъде свързан само когато кабелът е насочен надолу, перпендикулярно на конектора.

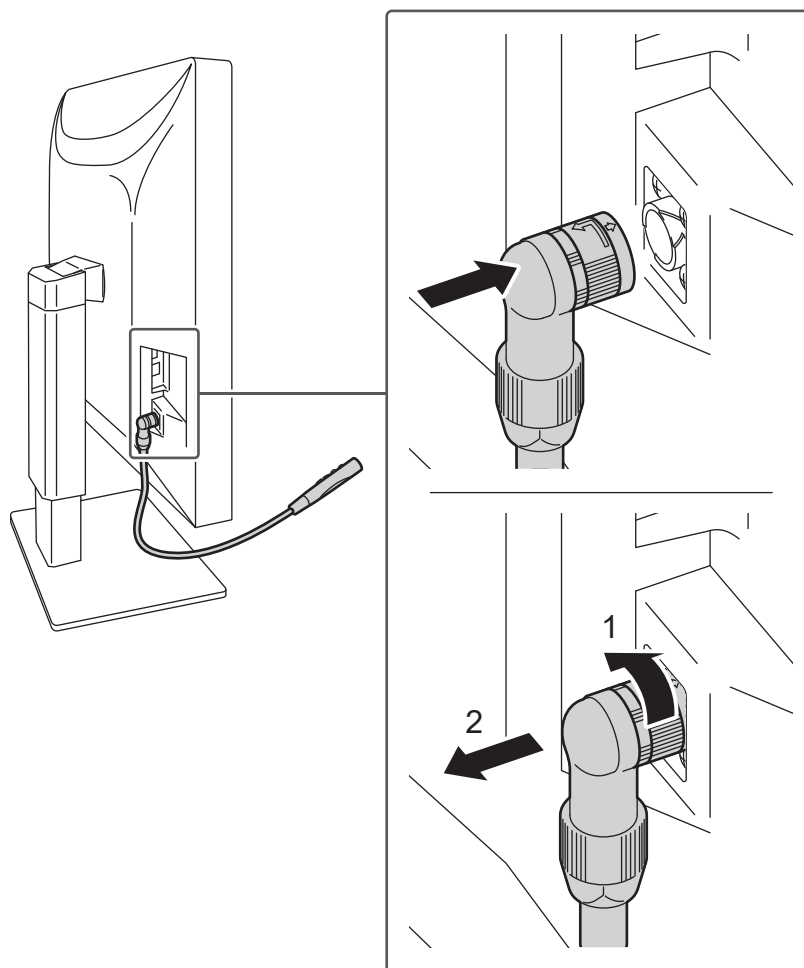

За да изключите кабела, издърпайте го, като завъртите свързания с монитора накрайник в посоката, обозначена с 1 в илюстрацията.

2.4 Включване на захранването

1. Докоснете , за да включите захранването на монитора.
Индикаторът на прекъсвача на захранването на монитора ще светне в зелено.
Ако индикаторът не свети, вижте [3 Няма картина](#)  34].

Бележка

- Ако докоснете някой от прекъсвачите с изключение на , докато мониторът е изключен,  започва да мига, за да ви покаже къде се намира прекъсвачът на захранването.

2. Включете компютъра.
Появява се изображението на екрана.
Ако не се появи изображение, вижте [3 Няма картина](#)  34] за допълнителните указания.

Внимание


- Когато се свързвате за първи път или променят метода на свързване, настройките на екрана, като например разделителна способност и мащаб, може да не са подходящи. Проверете дали настройките на компютъра са конфигурирани правилно.
- За максимално пестене на енергия е препоръчително да изключите от бутона за включване. Когато не използвате монитора, можете да изключите главното захранване или да извадите щепсела, така че захранването да бъде напълно изключено.

Бележка

- За да сведете до минимум скъсяването на експлоатационния живот на монитора в резултат на влошаване на яркостта, както и за намаляване на консумацията на ток, правете следното:
 - Използвайте функцията за пестене на енергия на компютъра или монитора.
 - Изключвайте монитора, след като го използвате.

2.5 Коригиране на височината на екрана и ъгъла


Задръжте горния и долния или левия и десния край на монитора с две ръце и коригирайте височината на екрана, наклонете го и го завъртете за създаване на най-добри условия за работа.

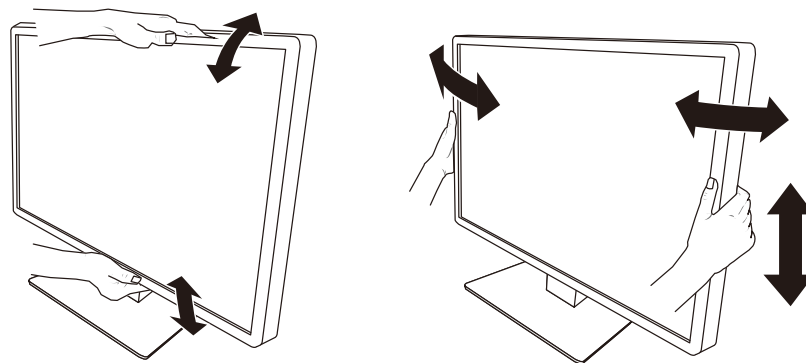**Внимание**


- След приключване на настройката проверете дали кабелите са свързани правилно.
- След настройка на височината и ъгъла прокарайте кабелите през кабелния държач.
- Когато регулирате ъгъла или позицията на монитора, докато помощната лампа е свързана, не прилагайте сила върху нея. В противен случай можете да повредите конектора или рамото.

2.6 Поставяне на капака за конекторите

1. Приберете кабелите в кабелния държач.

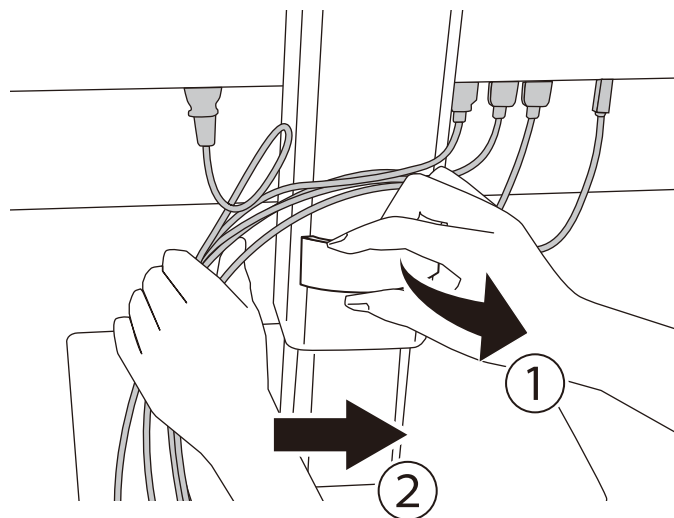

2. Поставете капака за конекторите.

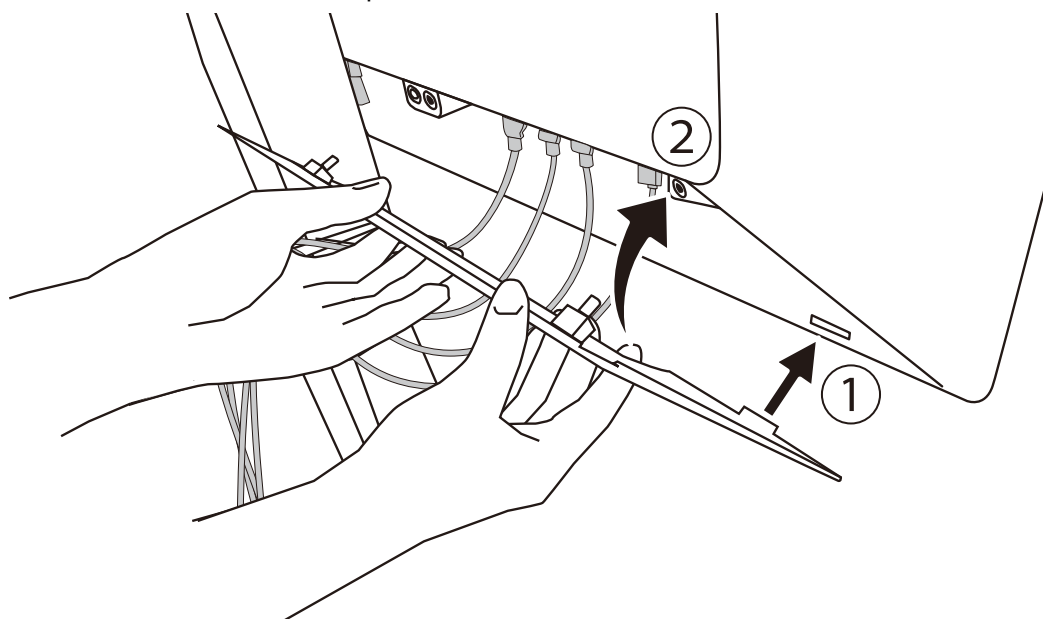

Например: Поставяна на капака за конекторите (десен)

Внимание

- Поставете го надеждно, за да не нарушите вентилацията във вътрешността на монитора.


Бележка

- За да свалите капака за конекторите, го дръпнете към себе си.

2.7 Използване на RadiLight Area/RadiLight Focus

1. Мониторът и компютърът трябва да са включени.
2. Използвайте бутоните за включване/изключване на RadiLight Area или RadiLight Focus.

Коригирайте яркостта на RadiLight Area.

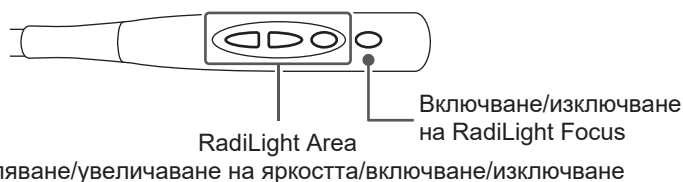

Внимание

- Поради разлики в светодиодите е възможно да има разминавания в цветовете и яркостта дори при един и същ продукт.
- Възможно е светлината от RadiLight Area да не е достатъчна в следните условия:
 - Ако разстоянието до стената или тавана е твърде голямо;
 - Ако стената или таванът са изработени от материали, които не отразяват добре или са тъмни на цвят.
- Когато променяте посоката на RadiLight Focus, коригирайте ъгъла, като държите не само върха на лампата, но и рамото ѝ.

Бележка

- За подробности относно настройването на RadiLight Area вижте ръководството за инсталиране (на CD-ROM).

3 Няма картина

Светлинният индикатор на прекъсвача на захранването не свети

- Проверете дали захранващият кабел е свързан правилно.
- Включете захранването чрез главния прекъсвач на гърба на монитора.
- Докоснете .
- Изключете захранването чрез главния прекъсвач на гърба на монитора и след няколко минути го включете отново.

Индикаторът за захранване свети: зелено

- Увеличете „Brightness“, „Contrast“ или „Gain“ в менюто за настройка. За подробности вижте ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
- Изключете захранването чрез главния прекъсвач на гърба на монитора и след няколко минути го включете отново.

Индикаторът за захранване свети: Оранжево

- Включете входния сигнал. За подробности вижте ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
- Преместете мишката или натиснете бутон от клавиатурата.
- Проверете дали компютърът е включен.
- Проверете дали сигналният кабел е свързан правилно. Свържете сигналните кабели към конекторите за съответния входен сигнал.
- Изключете захранването чрез главния прекъсвач на гърба на монитора и след това го включете отново.

Индикаторът на прекъсвача на захранването мига: оранжево, зелено

- Свържете посредством сигналния кабел, указан от EIZO. След това изключете захранването чрез главния прекъсвач на гърба на монитора и след няколко минути го включете отново.

На екрана се показва съобщението „No Signal“.

Например:




- Съобщението по-горе може да се покаже, ако компютърът не извежда сигнала веднага, след като бъде включен.
- Проверете дали компютърът е включен.
- Проверете дали сигналният кабел е свързан правилно. Свържете сигналните кабели към конекторите за съответния входен сигнал.

- USB-C конекторът (за свързване на периферни устройства: ) служи за извеждане на сигнала при последователно свързване. На екрана не се показва картина дори при връзка към компютър.
- Включете входния сигнал. За подробности вижте ръководството за инсталиране (на CD-ROM).
- Изключете захранването чрез главния прекъсвач на гърба на монитора и след това го включете отново.

На екрана се показва съобщението „Signal Error“.

Например:

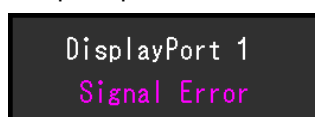

- Проверете дали компютърът е конфигуриран спрямо разделителната способност и честотата на вертикално сканиране на монитора (вижте [4.2 Поддържани разделителни способности \[► 38\]](#)).
- Рестартирайте компютъра.
- Изберете подходяща настройка чрез помощната програма на графичната карта. Вижте потребителското ръководство на графичната карта за повече информация.

На екрана се показва съобщението „DP Unsupported“



- Проверете дали свързаният кабел е сигнален кабел, препоръчан от EIZO.
- Проверете дали USB-C на свързаното устройство поддържа извеждане на видео сигнал (алтернативен режим DisplayPort). За подробности се свържете с производителя на устройството.
- Свържете кабел за DisplayPort или HDMI кабел.

4 Спецификации

4.1 Списък на спецификациите

4.1.1 Тип

RX670	Без блясък
RX670-AR	Без отражение

4.1.2 LCD панел

Тип	Цвят (IPS)
Задна подсветка	LED
Размер	30,0" (76,2 cm)
Разделителна способност	3280 точки x 2048 реда
Размер на показване (X x B)	645,5 mm x 403,0 mm
Плътност на пикселите (X x B)	0,197 mm x 0,197 mm
Изобразявани цветове	10 бита (DisplayPort/USB-C): До 1,07 милиарда цвята (от палитра от прикл. 543 милиарда цвята) 8 бита (DisplayPort/HDMI): 16,77 милиона цвята (от палитра от прикл. 543 милиарда цвята)
Зрителен ъгъл (X/B, типичен)	178°/178°
Препоръчителна яркост	500 cd/m ²
Съотношение на контрастност (типично)	1800:1
Време за отговор (типично)	25 ms (черен -> бял -> черен)

4.1.3 Видео сигнали

Входни конектори	DisplayPort x 2, USB-C (алтернативен режим за DisplayPort) x 1, HDMI x 1
Изходни конектори	USB-C (алтернативен режим за DisplayPort) x 1
Честота на хоризонтално сканиране	31 kHz – 127 kHz
Честота на вертикално сканиране ^{*1}	59 Hz – 61 Hz (720 x 400: 69 Hz – 71 Hz)
Режим на синхронизация на кадрите	59 Hz – 61 Hz
Точков часовник	25 MHz – 440 MHz

^{*1} Поддържаната честота на вертикално сканиране може да варира в зависимост от разделителната способност. За допълнителна информация вижте [4.2 Поддържани разделителни способности](#) [► 38].

4.1.4 USB

Порт	За връзка към компютър	USB-C x 1, USB-B x 2
	За периферни устройства	USB-A x 3, USB-C x 1
Стандартно	USB ревизия на спецификацията 2.0	
Скорост на комуникация	480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps	
Захранване	За връзка към компютър	USB-C: Максимум 94 W (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/4,7A)
	За периферни устройства	USB-A: Максимум 500 mA на порт USB-C: Максимум 15 W (5 V/3 A)

4.1.5 Мрежа

Порт	RJ-45 (LAN адаптер с USB)
Поддържани операционни системи ^{*1}	Windows 11 Windows 10 (32 бита/64 бита) macOS Sierra (10.12) или по-нова версия
LAN с кабел	IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T)

*1 Поддръжката от EIZO ще приключи, когато поддръжката на операционната система бъде прекратена от производителя.

4.1.6 Захранване

Вход	100 – 240 V променлив ток $\pm 10\%$, 50/60 Hz, 2,80 – 1,20 A
Максимална консумация на енергия	279 W или по-малко ^{*1}
Режим за пестене на енергия	0,5 W или по-малко ^{*2}
Режим на готовност	0,5 W или по-малко ^{*3}

*1 Когато има свързано външно натоварване, „Mode“: „4-Custom“, „Brightness“: „100%“, помощната светлина RadiLight Focus е включена, яркостта за RadiLight Area е максимална

*2 Когато се използва импортиране през DisplayPort и няма свързан USB порт за връзка към компютър, „Power Save“: „High“, „DP Power Save“: „On“, „One Cable PbyP“: „Off“, помощната светлина RadiLight Focus е свързана, но изключена, няма свързано външно натоварване

*3 Когато USB портът за връзка към компютър не се използва, „DP Power Save“: „On“, „One Cable PbyP“: „Off“, помощната светлина RadiLight Focus е свързана, но изключена, няма свързано външно натоварване

4.1.7 Физически спецификации

Размери (Ш x В x Д)	682,0 mm x 490,5 mm – 590,5 mm x 225,0 mm (наклон: 0°) 682,0 mm x 534,7 mm – 634,7 mm x 295,2 mm (наклон: 30°)
Размери (Ш x В x Д) (без стойка)	682,0 mm x 441,0 mm x 88,0 mm
Нето тегло	Прибл. 15,8 kg
Нето тегло (без стойка)	Прибл. 11,7 kg
Диапазон на височинна настройка	100 mm (наклон: 0°)
Наклон	Нагоре 30°, надолу 5°
Въртене	70°

4.1.8 Изисквания за работната среда

Температура	0 – 35°C
Влажност	20 – 80% R.H. (без конденз)
Налягане на въздуха	540 – 1060 hPa

4.1.9 Условия за транспортиране/съхранение

Температура	-20 – 60°C
Влажност	10 – 90% R.H. (без конденз)
Налягане на въздуха	200 – 1060 hPa

4.2 Поддържани разделителни способности

Мониторът поддържа следните разделителни способности:

✓: поддържа се, -: не се поддържа

Разделителна способност	Честота на вертикално сканиране (Hz)	DisplayPort/USB-C			HDMI	
		Показване на единичен прозорец	Показване в режим PbyP	Показване в режим PinP	Показване на единичен прозорец	Показване в режим PinP
640 x 480	59,940	✓	✓	✓	✓	✓
640 x 480	60,000	-	-	-	✓	✓
720 x 400	70,087	✓	✓	✓	✓	✓
720 x 480	59,940	-	-	-	✓	✓
720 x 480	60,000	-	-	-	✓	✓
800 x 600	60,317	✓	✓	✓	✓	✓
1024 x 768	60,004	✓	✓	✓	✓	✓
1200 x 1600	59,963	-	-	✓	-	✓
1200 x 1920	59,940	-	-	✓	-	✓
1280 x 720	59,940	-	-	-	✓	✓
1280 x 720	60,000	-	-	-	✓	✓
1280 x 1024	60,020	✓	✓	✓	✓	✓
1600 x 1200	60,000	✓	✓	✓	✓	✓
1640 x 2048	59,985	-	✓ ^{*1}	-	-	-
1920 x 1080	59,940	-	-	-	✓	✓
1920 x 1080	60,000	-	-	-	✓	✓
1920 x 1200	59,950	-	-	✓ ^{*1}	-	✓ ^{*1}
2560 x 1600	59,972	-	-	-	✓ ^{*2}	-
3280 x 2048	59,981	✓ ^{*1}	-	-	✓ ^{*3}	-

*1 Препоръчителна разделителна способност

*2 Препоръчителна разделителна способност, когато за „LMM Mode (HDMI)“ е зададено „On“ в „Administrator Settings“

*3 Препоръчителна разделителна способност, когато за „LMM Mode (HDMI)“ е зададено „Off“ в „Administrator Settings“

4.3 Аксесоари

Следните аксесоари се доставят отделно.

За актуална информация относно аксесоарите и информация за допълнително доставяните като опция най-нови съвместими графични карти вижте нашия уеб сайт.

(www.eizoglobal.com)

Комплект за калибриране	RadiCS UX2 версия 5.1.3 или по-нова RadiCS Version Up Kit версия 5.1.3 или по-нова
Network QC Management Software	RadiNET Pro версия 5.1.3 или по-нова
Комплект за почистване	ScreenCleaner
VESA адаптер за тънък клиент или миникомпютър	PCSK-R1
Сигнален кабел (USB-C – DisplayPort)	CP200

Приложение

Медицински стандарт

- Трябва да бъде гарантирано, че крайната система е в съответствие с изискването на IEC60601-1.
- Захранващото оборудване може да излъчва електромагнитни вълни, които могат да повлияят, ограничат или да доведат до повреда на монитора. Инсталирайте оборудването в контролирана среда, където подобни ефекти ще бъдат избегнати.

Класификация на оборудването

- Вид защита срещу токов удар: Клас I
- EMC клас: IEC60601-1-2 група 1, клас B
- Класификация на медицинското устройство (ЕС): Клас I
- Режим на работа: Постоянен
- IP клас: IPX0

Информация за ЕМС

Мониторът RadiForce RX670 е обезпечен за правилно показване на медицински изображения.

Среда за използване по предназначение

Мониторът RadiForce RX670 е предназначен за използване в посочената по-долу среда.

- Професионални здравни заведения, като клиники и болници
- Домашна среда, като например жилищни сгради и домове, на територията на неспециализирани здравни заведения

Следните места не са подходящи за използване на RadiForce RX670:

- Неспециализирани здравни заведения с изключение на домове за медико-социални грижи
- В близост до радиочестотно хирургическо оборудване като електрохирургически ножове
- В близост до терапевтично оборудване, работещо на къси вълни
- Екранирани за радиочестоти помещения за медицински системи за МРТ
- В екранирани места за специализирани приложения
- Монтирани в автомобили, включително в коли за бърза помощ
- Други специализирани места

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Мониторът RadiForce RX670 изисква специални предпазни мерки по отношение на ЕМС и трябва да бъде монтиран. Трябва внимателно да прочетете информацията за ЕМС и раздела ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ в този документ, както и да спазвате следните указания, когато инсталирате и работите с продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- RadiForce RX670 не трябва да се използва в близост до или върху друго оборудване. Ако се налага използване в близост до или върху друго оборудване, уредите или системата трябва да се наблюдават, за да се потвърди нормалната им работа в конфигурацията, в която ще бъдат използвани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когато се използва портативно радиочестотно оборудване, дръжте го на 30 cm (12 инча) или по-далече от която и да било част, включително кабелите, на RadiForce RX670. В противен случай може да се стигне до влошаване на работните характеристики на оборудването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Всеки, който свързва допълнително оборудване към входния или изходния сигнал, като конфигурира медицинска система, носи отговорност за това системата да отговаря на изискванията на IEC60601-1-2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не докосвайте конекторите за входен/изходен сигнал, докато използвате RadiForce RX670. В противен случай е възможно да бъде засегнато показваното изображение.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Непременно използвайте кабелите, доставени с продукта, или кабели, препоръчвани от EIZO.
Използването на кабели, различни от препоръчаните от EIZO за това оборудване, може да предизвика увеличени електромагнитни емисии или намалена електромагнитна устойчивост на това оборудване, както и неправилното му функциониране.

Сигнален порт	Макс. дължина на кабела	Екраниране	Феритни ядра	Препоръчителен кабел
DisplayPort	3 m	Екраниран	Без феритни ядра	PP300-V14
HDMI	3 m	Екраниран	С феритни ядра	HN300PR
USB-C (за връзка към компютър)	1,5 m	Екраниран	Без феритни ядра	CC150SS81G-5A
USB-C (за периферни устройства)	2 m	Екраниран	Без феритни ядра	-
USB-B (за връзка към компютър)	3 m	Екраниран	С феритни ядра	UU300/MD-C93
USB-A (за периферни устройства)	3 m	Екраниран	Без феритни ядра	-
Ethernet	30 m	Неекраниран	Без феритни ядра	-
AC вход (или женски AC конектор)	3 m	Неекраниран	Без феритни ядра	С проводник за заземяване

Техническо описание**Електромагнитни емисии**

Мониторът RadiForce RX670 е предназначен за използване в електромагнитната среда, посочена по-долу.

Клиентът или потребителят на RadiForce RX670 трябва да се увери, че RadiForce RX670 се използва в такава среда.

Тест за емисии	Съответствие	Електромагнитна среда – Указания
Радиочестотни емисии CISPR11	Група 1	RadiForce RX670 използва радиочестотна енергия само за вътрешните си функции. По тази причина техните радиочестотни емисии са много слаби и не могат да причинят смущения в близко електронно оборудване.
Радиочестотни емисии CISPR11	Клас B	Мониторът RadiForce RX670 е подходящ за използване във всякакви обекти, включително в домашни условия, както и такива, пряко свързани с обществената мрежа с ниско напрежение, която захранва сгради, използвани за битови нужди.
Хармонични емисии IEC61000-3-2	Клас D	
Колебания в напрежението/ емисии на трептене IEC61000-3-3	Съответства	

Електромагнитна устойчивост

Мониторът RadiForce RX670 е тестван при следните съвместими нива (C) в съответствие с посочените в IEC60601-1-2 изисквания за тестване (T) за професионални и домашни здравни заведения.

Клиентът или потребителят на RadiForce RX670 трябва да се увери, че мониторът се използва в такава среда.

Тест за устойчивост	Ниво на изпитване (T)	Ниво на съответствие (C)	Електромагнитна среда – Указания
Статично електричество (ESD) IEC61000-4-2	±8 kV контактно статично електричество ±15 kV въздушно статично електричество	±8 kV контактно статично електричество ±15 kV въздушно статично електричество	Подовите трябва да бъдат от дърво, бетон или керамични плочки. Ако подовите са покрити със синтетични материали, относителната влажност трябва да бъде поне 30%.
Преходно електричество/ пакети импулси IEC61000-4-4	Електропроводи ±2 kV ±1 kV за входно/ изходни линии	Електропроводи ±2 kV ±1 kV за входно/ изходни линии	Качеството на захранването от електрическата мрежа трябва да бъде като това на типична търговска или болнична среда.
Пренапрежения IEC61000-4-5	±1 kV фаза към фаза ±2 kV фаза към земя	±1 kV фаза към фаза ±2 kV фаза към земя	Качеството на захранването от електрическата мрежа трябва да бъде като това на типична търговска или болнична среда.
Спадове, кратки прекъсвания и промени в напрежението на захранващите входни линии IEC61000-4-11	0% U_T (100% спад в U_T) 0,5 цикъла и 1 цикъл 70% U_T (30% спад в U_T) 25 цикъла/50 Hz 0 % U_T (100 % спад в U_T) 250 цикъла/ 50 Hz	0% U_T (100% спад в U_T) 0,5 цикъла и 1 цикъл 70% U_T (30% спад в U_T) 25 цикъла/50 Hz 0 % U_T (100 % спад в U_T) 250 цикъла/ 50 Hz	Качеството на захранването от електрическата мрежа трябва да бъде като това на типична търговска или болнична среда. Ако потребителят на RadiForce RX670 изисква непрекъсната работа по време на отпадания на захранването от електрическата мрежа, препоръчва се RX670 да се захранва от непрекъсваемо захранване или от акумулатор.
Магнитни полета, причинени от честотата на захранващите напрежения IEC61000-4-8	30 A/m (50/60 Hz)	30 A/m	Магнитните полета, причинени от честотата на захранването, трябва да бъдат на нива, характерни за типично място в търговска или болнична среда. По време на работа изделието трябва да се държи на разстояние най-малко 15 cm от източника на магнитни полета, причинени от честотата на захранващите напрежения.

Тест за устойчивост	Ниво на изпитване (Т)	Ниво на съответствие (С)	Електромагнитна среда – Указания
Проведени смущения, причинени от радиочестотни полета IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz – 80 MHz 6 Vrms ISM ^{*1} и любителски радиочестоти ^{*2} между 150 kHz и 80 MHz	3 Vrms 6 Vrms	Преносимо и мобилно радиочестотно оборудване не трябва да се използва до която и да е част на RadiForce RX670, включително кабели, на разстояние, по-малко от препоръчителното, изчислено по уравнението, приложимо за честотата на предавателя. Препоръчителна дистанция $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$
Излъчено радиочестотно електромагнитно поле IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz	10 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$, 80 MHz – 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$, 800 MHz – 2,7 GHz Където Р е максималната изходна мощност на предавателя във ватове (W) според производителя на предавателя и d е препоръчителното разстояние в метри (m). Силата на полетата на фиксираните радиочестотни предаватели е определена от електромагнитното проучване на мястото ^{*3} , трябва да бъде по-малко от нивото на съответствие във всеки честотен диапазон ^{*4} . Могат да възникнат проблеми в близост до оборудването, отбелязани със следните символи. 

Бележка

- U_T е напрежението на променливотоковото захранване преди приложеното ниво на тестване.
- При 80 MHz и 800 MHz важи високите честотен диапазон.
- Указанията относно кондуктивни смущаващи въздействия, причинени от радиочестотни полета или от излъчени радиочестотни полета може да не са приложими във всички ситуации. Разпространението на електромагнитните вълни се влияе от абсорбцията и отражението от конструкции, предмети и хора.

^{*1} ISM диапазоните (за промишлени, научни и медицински цели) между 150 kHz и 80 MHz са от 6,765 MHz до 6,795 MHz, 13,553 MHz до 13,567 MHz, 26,957 MHz до 27,283 MHz и 40,66 MHz до 40,70 MHz.

^{*2} Любителският радиоспектър от 0,15 MHz до 80 MHz включва диапазоните от 1,8 MHz до 2,0 MHz, 3,5 MHz до 4,0 MHz, 5,3 MHz до 5,4 MHz, 7 MHz до 7,3 MHz, 10,1 MHz до 10,15 MHz,

14 MHz до 14,2 MHz, 18,07 MHz до 18,17 MHz, 21,0 MHz до 21,4 MHz, 24,89 MHz до 24,99 MHz, 28,0 MHz до 29,7 MHz и 50,0 MHz до 54,0 MHz.

- *3 Силата на полето от фиксирани предаватели, като например базови станции за радиотелефони (клетъчни/безжични) и мобилни наземни радиостанции, любителско радио, AM и FM радиоприемници и телевизионното разпръскване не може да бъде предсказана теоретично с точност. За да се оцени електромагнитната обстановка във връзка с фиксираните радиочестотни предаватели, трябва да се направи електромагнитно проучване на обекта. Ако измерената сила на полето, където се използва RadiForce RX670, надхвърля нивото за приложимата радиочестотна съвместимост по-горе, RadiForce RX670 трябва да се наблюдава, за да се потвърди, че работи нормално. Ако се наблюдава необичайна работа, може да са необходими допълнителни мерки като пренасочване или преместване на RadiForce RX670.
- *4 В честотния диапазон от 150 kHz до 80 MHz силата на полето трябва да бъде по-малко от 3 V/m.

Препоръчителни разстояния между преносимото или мобилно радиочестотно комуникационно оборудване и RadiForce RX670

Мониторът RadiForce RX670 е предназначен за използване в електромагнитна среда, в която излъчваните радиочестотни смущения се контролират. Клиентът или потребителят на RadiForce RX670 може да помогне за предотвратяването на електромагнитните смущения, като поддържа минимално разстояние (30 cm) между преносимото и мобилно радиочестотно оборудване (предавателите) и RadiForce RX670. Мониторът RadiForce RX670 е тестван при следните нива на съответствие (C) за задължителните нива на тестване (T) за устойчивост на близки електромагнитни полета в следните радиочестотни комуникационни услуги.

Тестова честота (MHz)	Честотна лента ^{*1} (MHz)	Услуга ^{*1}	Модулация ^{*2}	Ниво на изпитване (T) ^{*3} (V/m)	Ниво на съответствие (C) (V/m)
385	380 – 390	TETRA 400	Импулсна модулация ^{*2} 18 Hz	27	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5 kHz отклонение 1 kHz синусоида	28	28
710	704 – 787	LTE обхват 13, 17	Импулсна модулация ^{*2} 217 Hz	9	9
745					
780					
810	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, LTE Band 5	Импулсна модулация ^{*2} 18 Hz	28	28
870					
930					
1720	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Импулсна модулация ^{*2} 217 Hz	28	28
1845					
1970					
2450	2400 – 2570	Bluetooth®, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Импулсна модулация ^{*2} 217 Hz	28	28
5240	5100 – 5800	WLAN 802.11 a/n	Импулсна модулация ^{*2} 217 Hz	9	9
5500					
5785					

*1 За някои услуги са включени само честотите във възходяща посока.

*2 Носещата честота се модулира с използване на сигнал с правоъгълна форма с 50% коефициент на запълване.

*3 Тестовите нива са изчислени при максимална мощност и разстояние от 30 cm.

Клиентът или потребителят на RadiForce RX670 може да потисне смущенията, причинявани от близки магнитни полета, като поддържа минимално разстояние (15 cm) между радиочестотния предавател и RadiForce RX670. Миниторът RadiForce RX670 е тестван при следните нива на съвместимост (C) за задължителните тестови нива (T) на устойчивост към близки магнитни полета.

Тестова честота	Модулация	Ниво на тестване (T) (A/m)	Ниво на съответствие (C) (A/m)
30 kHz	CW (непрекъсната вълна)	8	8
134,2 kHz	Импулсна модулация* ¹ 2,1 kHz	65	65
13,56 MHz	Импулсна модулация* ¹ 50 kHz	7,5	7,5

*¹ Носещата честота се модулира с използване на сигнал с правоъгълна форма с 50% коефициент на запълване.

Разстоянието между останалото преносимо и мобилно радиочестотно комуникационно оборудване (предавателите) и RadiForce RX670 е както е препоръчано по-долу, в съответствие с максималната изходна мощност на комуникационното оборудване.

Номинална максимална изходна мощност на предавателя (W)	Отделяне на разстояние според честотата на предавателя (m)		
	150 kHz – 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz – 2,7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

За предаватели с номинална мощност, отговаряща на максималната изходна мощност, които не са посочени по-горе, препоръчителното разстояние d в метри (m) може да бъде определено като се използва уравнението, приложимо към честотата на предавателя, където P е максималното ниво на мощност на предавателя във ватове (W) в съответствие с производителя на предавателя.

Бележка
- При 80 MHz и 800 MHz важи дистанцията за по-високия честотен диапазон. - Указанията относно кондуктивни смущаващи въздействия, причинени от радиочестотни полета или от излъчени радиочестотни полета може да не са приложими във всички ситуации. Разпространението на електромагнитните вълни се влияе от абсорбцията и отражението от конструкции, предмети и хора.



EIZO Corporation 
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO GmbH EC REP
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

艺卓显像技术(苏州)有限公司
中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

EIZO Limited UK Responsible Person
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

EIZO AG CH REP
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland



00N0N440AZ
IFU-RX670